


Reinigung aponorm® Manschetten


Manschetten ohne entnehmbare Blase (aktueller Standard)

1. Breiten Sie Ihre Manschette so weit wie möglich aus, sodass sie in etwa wie in Abb. 1 aussieht.
2. Sprühen Sie die Manschette von allen Seiten mit einem handelsüblichen Flächendesinfektionspray ein (siehe Abb. 2).
3. Lassen Sie die Manschette bei feuchter Reinigung kurz zum Lufttrocknen ausgebreitet, bevor Sie diese wieder nutzen.

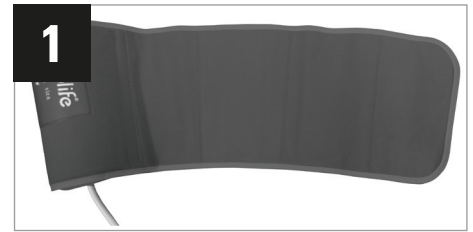

Manschetten mit herausnehmbarer Blase

1. Ziehen Sie eine Seite der Manschette aus dem Bügel und breiten Sie diese vollständig aus. Die Seite mit dem Schlauchanschluss muss zu Ihnen zeigen.
2. Entnehmen Sie die Blase, indem Sie diese über den dünnen Entnahmeschlitz auf der Innenseite der Manschette aus dem Blasenfach herausziehen. Ziehen Sie die Blase vom Schlauch ab und den Schlauch wiederum aus der Manschette (siehe Abb. 3 und 4).
3. Waschen Sie die Manschette bei max. 30° C per Handwäsche. Verzichten Sie dabei auf den Einsatz von Waschmitteln.
4. Breiten Sie die Manschette nach dem Waschen vollständig aus (siehe Abb. 5) und lassen sie lufttrocknen.
5. Nachdem Ihre Manschette vollständig getrocknet ist, ziehen Sie den Schlauch wieder durch das Verbindungsloch zum Blasenfach in Richtung Entnahmeschlitz der Blase. Verbinden Sie den Schlauch wieder mit der Blase.
6. Rollen Sie die Blase etwas ein, um sie gut in das Blasenfach einschieben zu können. Sobald die Blase vollständig eingelegt ist, entfalten Sie diese wieder, sodass sie komplett ausgerollt, gerade und ohne Knick im Fach liegt.

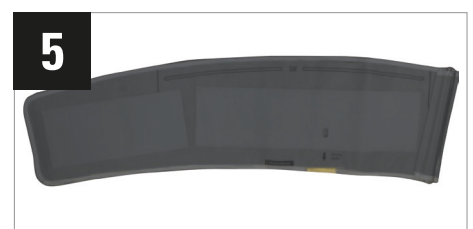

Alternativ können Sie diese Manschetten natürlich auch wie die Manschetten ohne entnehmbare Blase desinfizieren.